



Aroma Diffusoren

Allgemein

Die Aromatherapie als Raumbeduftung, wird punktuell im Patientenzimmer eingesetzt.

Bevorzugt sind Aroma Diffusoren ohne Wasser- und Dampfnutzung zu empfehlen.

Bei wasserführenden Aroma-Diffusoren ist zum Befüllen des Wassertanks steriles Aquadest zu verwenden.

Aufbereitung wasserführender Aroma Diffusoren

Um Kontaminationen zu vermeiden, ist nach Beendigung der Aroma Therapie bzw. mindestens einmal täglich, der Wassertank des Aroma Diffusor zu leeren.

Anschließend wird der Aroma Diffusor in seine Einzelteile zerlegt und eine sorgfältige Wischdesinfektion durchgeführt.

Wenn vom Hersteller angegeben, kann die Aufbereitung auch im Geschirrspüler erfolgen.

Nach der Trocknung wird der Aroma Diffusor zusammengesetzt und kann erneut verwendet bzw. geschützt gelagert werden.

Tägliche schriftliche Dokumentation der Aufbereitung.