



## Blutzuckermessgeräte

### Aufbereitung - Wann?

- o nach jeder Messrunde
- o sofort nach Kontamination

#### Bei infektiösen Patienten

- o **nach** jeder Nutzung

#### Bei immunsupprimierten Patienten

- o **vor** jeder Nutzung.

### Aufbereitung - Wie?

- o Gerät aus der Basisstation entnehmen
- o Wischdesinfektion mit Cleanisept Wipes (Desinfektionstücher)
- o Vorsicht bei der Desinfektion im Bereich der Teststreifenaufnahme
- o Desinfektion nur mit feuchtem (nicht mit nassem) Tuch