



Fieberthermometer

Digitalthermometer und quecksilberfreie Thermometer mit Analoganzeige

Patientenbezogen einsetzen und nach jedem Gebrauch Wischdesinfektion mit Desinfektionstuch (siehe Desinfektionsplan; Einwirkzeit beachten)

- o auch bei Verwendung von Schutzhüllen

Infrarot-Ohrthermometer

Nur mit Schutzkappe verwenden

- o diese nach jeder Nutzung entsorgen bzw. patientenbezogen einsetzen

Wischdesinfektion des Ansatzstutzens

- o Wischdesinfektion mit Desinfektionstuch (siehe Desinfektionsplan; Einwirkzeit beachten) Durchführung nach jeder Messrunde

Bei infektiösen Patienten

- o **nach** jeder Nutzung

Bei immunsupprimierten Patienten

- o **vor** jeder Nutzung