



Fieberthermometer

Digitalthermometer und quecksilberfreie Thermometer mit Analoganzeige

Patientenbezogen einsetzen und nach jedem Gebrauch mit Cleanisept wipes abwischen

- o auch bei Verwendung von Schutzhüllen

Infrarot-Ohrthermometer

Nur mit Schutzkappe verwenden

- o diese nach jeder Nutzung entsorgen bzw. patientenbezogen einsetzen

Wischdesinfektion des Ansatzstutzens

- o Mittels Cleanisept wipes-Tücher
- o nur mit feuchtem (nicht nassem) Tuch
- o Durchführung nach jeder Messrunde

Bei infektiösen Patienten

- o **nach** jeder Nutzung

Bei immunsupprimierten Patienten

- o **vor** jeder Nutzung