



Inkubatoren

Allgemeines

- 1 h vor Inbetriebnahme belüften bei laufendem Motor (Herstellerangaben beachten!)
- Gerät beim Nichtbenutzen in einem reinen abgetrennten Bereich vor Kontamination geschützt lagern

	Wechselrhythmen/Standzeiten	Allgemeine Hinweise
Wechsel des Inkubators pro Kind	Empfehlungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ tgl. Wechsel im Verlauf einer Sanierungsbehandlung bei MRE ○ ansonsten bei klinisch stabilen Kindern wöchentlich 	
Wischdesinfektion	Innenflächen: <ul style="list-style-type: none"> ○ bei Wechsel des Inkubators bzw. Entlassung des Kindes Außenflächen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Handkontaktflächen arbeitstäglich wischdesinfizieren 	Mittel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Desinfektionsmittel laut Desinfektionsplan ○ anschließend den gesamten Inkubator und alle Kleinteile mit Einmal-lappen und sterilem Aqua dest. abwischen
Belegter Inkubator	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keine patientenseitige Desinfektion ○ bei Bedarf Reinigung der Innenseite mit Wasser von Trinkwasserqualität 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Für jeden Inkubator frisches, keimarmes Tuch verwenden
Kunststoffschlauchleitungen (Befeuchtung)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufbereitung bei Wechsel bzw. Entlassung des Kindes 	
Beatmungsschläuche	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wechsel aller 7 Tage 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kontaminationssichere Lagerung
Luftfilter	<ul style="list-style-type: none"> ○ nach Herstellerangaben 	
ggf. Bakterienfilter	<ul style="list-style-type: none"> ○ nach Herstellerangaben 	
Inhalationstherapie beatmeter Patienten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nur sterile Materialien und Lösungen einbringen 	
Personal für Aufbereitung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nur geschultes Personal 	