



Stauschlauch, Blutdruckmanschette, Stethoskop

Aufbereitung

Wann?

- Nach jeder Nutzung
- Sofort nach Kontamination

Bei infektiösen Patienten patientengebundene Medizinprodukte nutzen. Diese bleiben während der stationären Behandlung im Zimmer des Patienten.

Wie?

Stauschläuche

- Wischdesinfektion der Stauschläuche mit Desinfektionstuch (siehe Desinfektionsplan; Einwirkzeit beachten)

Blutdruckmanschette

- Wischdesinfektion der Blutdruckmanschetten mit Desinfektionstuch (siehe Desinfektionsplan; Einwirkzeit beachten)

Stethoskope

- Wischdesinfektion der Stethoskope mit Desinfektionstuch (siehe Desinfektionsplan; Einwirkzeit beachten)