



Stauschlauch, Blutdruckmanschette, Stethoskop

Aufbereitung

Wann?

- Nach jeder Nutzung
- Sofort nach Kontamination

Bei infektiösen Patienten patientengebundene Medizinprodukte nutzen. Diese bleiben während der stationären Behandlung im Zimmer des Patienten.

Wie?

Stauschläuche

- Stauschläuche satt mit Hautdesinfektionsmittel (z. B. Octeniderm) einsprühen und trocknen lassen (z. B. am Verbandwagen)

Blutdruckmanschette

- Wischdesinfektion mittels Einmaltuch und Desinfektionsmittel
 - Bacillol AF
 - Incidin Foam

Stethoskope

- Wischdesinfektion mittels Einmaltuch und Desinfektionsmittel
 - Cleanisept wipes
 - Incidin Foam
 - Octeniderm