



Verneblersystem Aeroneb professional

Vernebler verbleibt innerhalb des Beatmungssystems (keine Diskonnektion)

- o Wechsel inklusive der Beatmungsschläuche alle 7 Tage
- o Anschließend komplette Aufbereitung (Desinfektion und Sterilisation) in der AEMP (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte)

Wenn Vernebler nach jeder Nutzung entfernt wird (Diskonnektion)

- o Reinigung und Spülung mit sterilem Aqua dest. nach jeder Entfernung
- o Aufbewahrung trocken und staubfrei
- o Desinfektion 1x täglich

Patientenwechsel

- o Komplette Aufbereitung (Desinfektion und Sterilisation) in der AEMP nach jedem Patientenwechsel