

Aufbereitung C-MAC Videolaryngoskop Firma STORZ

Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie

Zu berücksichtigende Dokumente

- Basishygieneordnung der UMR
- Herstellerangaben

Aufbereitung Spatel

1. Verunreinigungen mit trockenem Tuch unmittelbar nach Verwendung entfernen
2. Fiberoptikschutz (Gummistopfen) aufsetzen
3. Spatel in Sekusept Plus 4 % einlegen
 - Einwirkzeit: 15 Minuten
4. Gründliches Abspülen unter klarem Wasser (Trinkwasserqualität)
5. Trocknen
6. Umgehende geschlossene Lagerung

Beachte


Zeitliche oder räumliche Trennung der unreinen und reinen Arbeitsschritte während der Aufbereitung.

Aufbereitung Gerät/Monitor

Flächendesinfektion nach Verwendung mit Terralin protect 0,5 % bzw. Incidin Foam.

Standzeit Sekusept Plus 4 %

	Unbenutzte Lösung	Benutzte Lösung
Wechsel	Spätestens nach 14 Tagen	Spätestens nach 24 Stunden
Aufbewahrung	Abgedecktes, sauberes Gefäß Gefäß ist regelmäßig aufzubereiten	

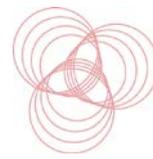

Aufbereitung C-MAC Videolaryngoskop Firma STORZ

Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie

Kennzeichnung Behälter

- Mittel
- Konzentration
- Ansatzdatum

Beispiel Dosierung einer 4-prozentigen-Lösung

100 ml Gebrauchslösung		1 Liter Gebrauchslösung	
Vermischen von		Vermischen von	
96 ml	Wasser	960 ml	Wasser
4 ml	Sekusept Plus	40 ml	Sekusept Plus