

Aufbereitung C-MAC Videolaryngoskop Firma STORZ

Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie

Zu berücksichtigende Dokumente

- o Basishygieneordnung der UMR
- o Herstellerangaben

Aufbereitung Spatel

1. Verunreinigungen mit trockenem Tuch unmittelbar nach Verwendung entfernen
2. Fiberoptikschutz (Gummistopfen) aufsetzen
3. Spatel in Anios Clean Exel D 1,5 % einlegen
 - Einwirkzeit: 15 Minuten
4. Gründliches Abspülen unter klarem Wasser (Trinkwasserqualität)
5. Trocknen

Aufbereitung Gerät/Monitor

- o Flächendesinfektion nach Verwendung mit Descosept-sensitive-Tüchern

Anios Clean Exel D

Standzeit		
	Unbenutzte Lösung	Benutzte Lösung
Wechsel	o Spätestens nach 14 Tagen	o Spätestens nach 24 Stunden
Aufbewahrung	o Abgedecktes, sauberes Gefäß o Gefäß ist regelmäßig aufzubereiten	

Kennzeichnung Behälter	Dosierungsbeispiel einer 1,5%igen Lösung			
o Mittel		985	ml	Wasser
o Konzentration	+	15	ml	Anios Clean Exel D
o Ansatzdatum	+			Mischen
	=	1	Liter	Gebrauchslösung