



Zu berücksichtigende Dokumente	<ul style="list-style-type: none">○ Basishygieneordnung der UMR○ Herstellerangaben
Aufbereitung Spatel	<ol style="list-style-type: none">1. Verunreinigungen mit trockenem Tuch unmittelbar nach Verwendung entfernen2. Fiberoptikschutz (Gummistopfen) aufsetzen3. Spatel in Anios Clean Exel D 1,5 % einlegen<ul style="list-style-type: none">● Einwirkzeit: 15 Minuten4. Gründliches Abspülen unter klarem Wasser (Trinkwasserqualität)5. Trocknen
Aufbereitung Gerät/Monitor	<ul style="list-style-type: none">○ Nach Verwendung Flächendesinfektion mit Descosept-sensitive-Tüchern

